

AngelSounds

JPD-100S+

Zařízení pro sledování srdečních ozev
plodu

Manuál

Představení produktu

AngelSounds JPD-100S+ je lehký a přenosný detektor pro poslech srdečních ozev plodu dítěte.

Připojený mobilní telefon může přes Bluetooth zobrazovat data a poskytovat další informace o plodu.

Pozn. Pro správnou funkčnost musí mít plod alespoň 20 týdnů. Užívání přístroje konzultujte s lékařem.

Obsah balení

AngelSounds JPD-100S+, USB kabel, headset, jack-jack kabel, audio kabel, pás pro upevnění, manuál

Bezpečnostní upozornění




Vyhňte se používání zařízení v prostředí s potencionálním rizikem výbuchu, prostředí s vysokou či velmi nízkou teplotou nebo vlhkostí, v blízkosti otevřeného ohně. Doporučujeme zařízení nepoužívat ve venkovním prostředí.

Po ukončení sledování ze zařízení vždy setřete gel.

Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození!

Pokud zařízení čistíte, mějte jej vždy vypnuté.

Základy používání

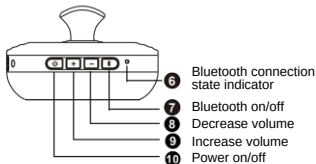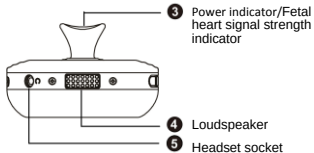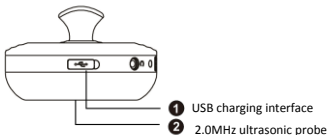

1. Konektor pro připojení USB
2. Sonda
3. Indikátor kapacity baterie a srdečních ozev
4. Hlasitý reproduktor
5. Konektor pro připojení sluchátek
6. Indikátor Bluetooth připojení
7. Zapnutí / vypnutí Bluetooth
- 8/9. Snížení / zvýšení hlasitosti
10. Zapnutí / Vypnutí

Zařízení zapnete stiskem tlačítka 10. Pro vypnutí podržte stejné tlačítko cca. 2 sekundy.

Tlačítka hlasitosti upravujete zvuk. Zařízení má celkem 5 úrovní hlasitosti, při nejnižším je zvuk zcela vypnutý.

Bluetooth zapnete stiskem tlačítka 6. Zařízení musí být zapnuté. Po spuštění Bluetooth začne blikat dioda. Pro vypnutí Bluetooth tlačítko znovu stiskněte. Nabíjení trvá zhruba 2-4 hodiny. Nutnost dobítí signalizuje blikající dioda.

Headset

Headset může být připojen dvěma způsoby. Buď samostatně, nebo přes audio kabel, jak je ukázáno na obrázku 2. Při využití druhého způsobu a připojení jack-jack kabelu lze druhý konec kabelu připojit do mobilního telefonu a nahrávat srdeční ozvy plodu.



Způsob 1





Způsob 2

Stavy indikátoru

Typ indikátoru	Stav indikátoru	Operační stav
Indikátor nabití / síly srdečních ozev (tlačítko 3)	Svítil zeleně	Zařízení je plně dobité
	Svítil oranžově	Zařízení se dobíjí
	Bliká zeleně	Zařízení potřebuje dobít
	Bliká podle frekvence srdečních ozev plodu	Zařízení zachytilo signál srdečních ozev plodu
Bluetooth indikátor	Nesvítil	Bluetooth není aktivní.
	Bliká průběžně zeleně a modře	Bluetooth je aktivní a připravené na spárování.
	Bliká pomalu modře	Zařízení je spárováno

Postup nalezení srdce plodu

Naneste na sondu (tlačítko 2) trochu gelu a umístěte ji na břicho. Pomalu s ní pohybujte a snažte se nalézt srdce plodu. Po nalezení zvuku se sondou nadále pomalu pohybujte a hledejte místo, kde bude zvukový signál nejčistší. Obvyklou polohu plodu vidíte na následujícím obrázku. Poloha plodu se ale může lišit v závislosti na stupni těhotenství a dalších podmínkách.

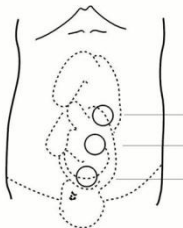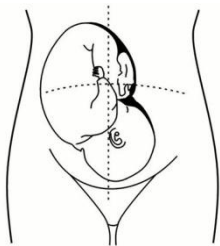

Samostatné použití

Připojte do zařízení sluchátka.

Zapněte zařízení.

Nalezněte srdce plodu podle předchozího popisu. Pokud není zvuk dostatečný, upravte hlasitost.

Spočítejte počet ozev za minutu a získáte informaci o srdečním rytmu.

Doporučujeme počítání zopakovat vícekrát.

Vypněte zařízení.

Použití v kombinaci s mobilním telefonem

Nainstalujte aplikaci AngelSounds (iOS 7/Android 4.3 a vyšší + nutnost Bluetooth 4.0 nebo vyšší).

Zapněte zařízení a zapněte Bluetooth.

V nastavení Bluetooth mobilního telefonu zařízení spárujte.

Spusťte aplikaci AngelSounds.

Připojte audio kabel do telefonu podle vzoru na obrázku „Způsob 2“.
Podrobnější informace o aplikaci najdete na stránkách
www.mobilnipodpora.cz.

Technické specifikace

Akustická frekvence: 2.0MHz±5%
Efektivní oblast zaznamenávání: 5.08cm2
Dobrá provozu: 4-6 hodin
Kapacita baterie: 600mAh
Voděodolnost: IPX4

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že AngelSounds JPD 100S+ je ve shodě se základními požadavky směrnice 93/42/EEC.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na
www.mobilnipodpora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

AngelSounds

JPD-100S+

Zariadenie na sledovanie srdcových
oziev plodu

Manuál

Predstavenie produktu

AngelSounds JPD-100S + je ľahký a prenosný detektor pre počúvanie srdcových oziev plodu dieťaťa.

Pripojený mobilný telefón môže cez Bluetooth zobrazovať dáta a poskytovať ďalšie informácie o plodu.

Pozn. Pre správnu funkčnosť musí mať plod aspoň 20 týždňov. Užívanie prístroja konzultujte s lekárom.

Obsah balenia

AngelSounds JPD-100S +, USB kábel, headset, jack-jack kábel, audio kábel, pás pre upevnenie, manuál

Bezpečnostné upozornenie




Vyhňte sa používaniu zariadenia v prostredí s potencionálnym rizikom výbuchu, prostredie s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou alebo vlhkosťou, v blízkosti otvoreného ohňa. Odporúčame zariadenie nepoužívať vo vonkajšom prostredí.

Po ukončení sledovania zo zariadenia vždy zotrite gél.

Nepoužívajte zariadenie, ak javí známky poškodenia!

Ak zariadenie čistíte, majte ho vždy vypnuté.

Základy používania

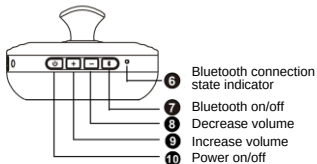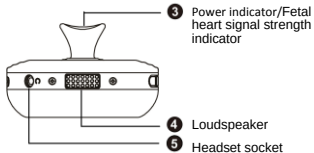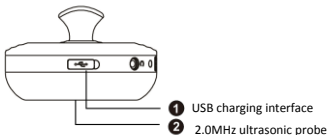

1. Konektor pre pripojenie USB
2. Sonda
3. Indikátor kapacity batérie a srdcových oziev
4. Hlasitý reproduktor
5. Konektor pre pripojenie slúchadiel
6. Indikátor Bluetooth pripojenie
7. Zapnutie / vypnutie Bluetooth
- 8/9. Zníženie / zvýšenie hlasitosti
10. Zapnutie / Vypnutie

Zariadenie zapnete stlačením tlačidla 10. Pre vypnutie podržte rovnaké tlačidlo cca. 2 sekundy.

Tlačidlami hlasitosti upravujete zvuk. Zariadenie má celkom 5 úrovní hlasitosti, pri najnižšom je zvuk úplne vypnutý.

Bluetooth zapnete stlačením tlačidla 6. Zariadenie musí byť zapnuté. Po spustení Bluetooth začne blikať dióda. Pre vypnutie Bluetooth tlačidlo znova stlačte.

Nabíjanie trvá približne 2-4 hodiny. Nutnosť dobitia signalizuje blikajúca dióda.

Headset

Headset môže byť pripojený dvoma spôsobmi. Buď samostatne, alebo cez audio kábel, ako je ukázané na obrázku 2. Pri využití druhého spôsobu a pripojenie jack-jack kábla možno druhý koniec kábla pripojiť do mobilného telefónu a nahrávať srdcové ozvy plodu.



Způsob 1



Způsob 2



Stavy indikátoru

Typ indikátora	Stav indikátora	Operačný stav
Indikátor nabitia / sily srdcových oziev (tlačidlo 3)	Svieti zeleno	Zariadenie je plne nabité
	Svieti oranžovo	Zariadenie sa dobíja
	Bliká zeleno	Zariadenie potrebuje dobiť
	Bliká podľa frekvencie srdcových oziev plodu	Zariadenie zachytilo signál srdcových oziev plodu
Bluetooth indikátor	Nesvieti	Bluetooth nie je aktívny.
	Bliká priebežne zelene a modro	Bluetooth je aktívny a pripravené na spárovanie.
	Bliká pomaly modro	Zariadenie je spárované

Postup nájdenie srdca plodu

Naneste na sondu (tlačidlo 2) trochu gélu a umiestnite ju na brucho. Pomaly s ňou pohybujte a snažte sa nájsť srdce plodu. Po nájdení zvuku so sondou naďalej pomaly pohybujte a hľadajte miesto, kde bude zvukový signál najčistejší.

Obvyklou polohu plodu vidíte na nasledujúcom obrázku. Poloha plodu sa ale môže líšiť v závislosti na stupni tehotenstva a ďalších podmienkach.

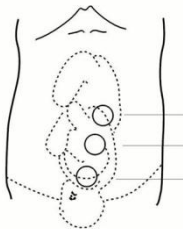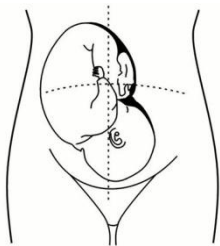

Samostatné použitie

Pripojte do zariadenia slúchadla.

Zapnite zariadenie.

Nájdite srdce plodu podľa predchádzajúceho popisu. Ak sa zvuk dostatočný, upravte hlasitosť.

Spočítajte počet oziev za minútu a získate informáciu o srdcovom rytme.

Odporúčame počítanie zopakovať viackrát.

Vypnite zariadenie.

Použitie v kombinácii s mobilným telefónom

Nainštalujte aplikáciu AngelSounds (iOS 7 / Android 4.3 a vyššie + nutnosť Bluetooth 4.0 alebo vyšší).

Zapnite zariadenie a zapnite Bluetooth.

V nastavení Bluetooth mobilného telefónu zariadenia spárujte.

Spustite aplikáciu AngelSounds.

Pripojte audio kábel do telefónu podľa vzoru na obrázku "Spôsob 2".
Podrobnejšie informácie o aplikácii nájdete na stránkach
www.mobilnipodpora.cz.

technické špecifikácie

Akustická frekvencia: 2.0MHz $\pm$ 5%
Efektívna oblasť zaznamenávanie: 5.08cm²
Dobrá prevádzky: 4-6 hodín
Kapacita batérie: 600mAh
Vodeodolnosť: IPX4

Likvidácia



Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistiť jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Hájecká 14, 618 00 Brno) prehlasuje, že AngelSounds JPD 100S + je v zhode so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EEC.



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na
www.mobilnipodpora.cz.
Tlačové chyby vyhradené.