

Viatom Kids O2 – uživatelský manuál

Představení

Tento výrobek je určen k měření, zobrazování a ukládání pulzní saturace kyslíkem (SpO₂), a tepové frekvence u dětí (3-10 let) v domácím prostředí.

Upozornění: Tento výrobek je určen pro všeobecné použití. Neměl by být používán k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního stavu.

Upozornění

Senzor nemačkejte ani na něj nevyvíjejte žádný tlak.

Nepoužívejte tento přístroj během vyšetření magnetickou rezonancí.

Přístroj neskladujte na následujících místech: na místech, kde je přístroj vystaven přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo vlhkosti, nebo silnému znečištění; místa v blízkosti zdrojů vody nebo ohně; nebo na místech, která jsou vystavena silným elektromagnetickým vlivům.

Nepoužívejte zařízení v hořlavém prostředí.

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Zařízení nečistěte acetonem nebo jinými těkavými látkami.

Zařízení neupusťte (nemá zvýšenou odolnost) a nevystavujte jej silným nárazům.

Přístroj a příslušenství jsou dodávány nesterilní.

Neumisťujte tento přístroj do tlakových nádob nebo do plynových zařízení.

Zařízení nerozebírejte.

Pokud se u vás objeví příznaky, které by mohly naznačovat akutní onemocnění, vždy je konzultujte s doktorem.

Nediagnostikujte a nelečte se sami na základě tohoto přístroje bez konzultace s lékařem. Zejména, nezačínajte užívat žádné nové léky ani neměňte jejich užívání typ a/nebo dávkování jakéhokoli stávajícího léku bez předchozího souhlasu.

Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto návodu.


Dlouhodobé nepřetržité monitorování může zvýšit riziko nežádoucích změn vlastností kůže, jako je např. podráždění, zarudnutí, tvorba puchýřů nebo popálení.

Neotevírejte kryt přístroje bez oprávnění.

Obsah Balení

Zařízení, manuál, datový/nabíjecí kabel

Přehled

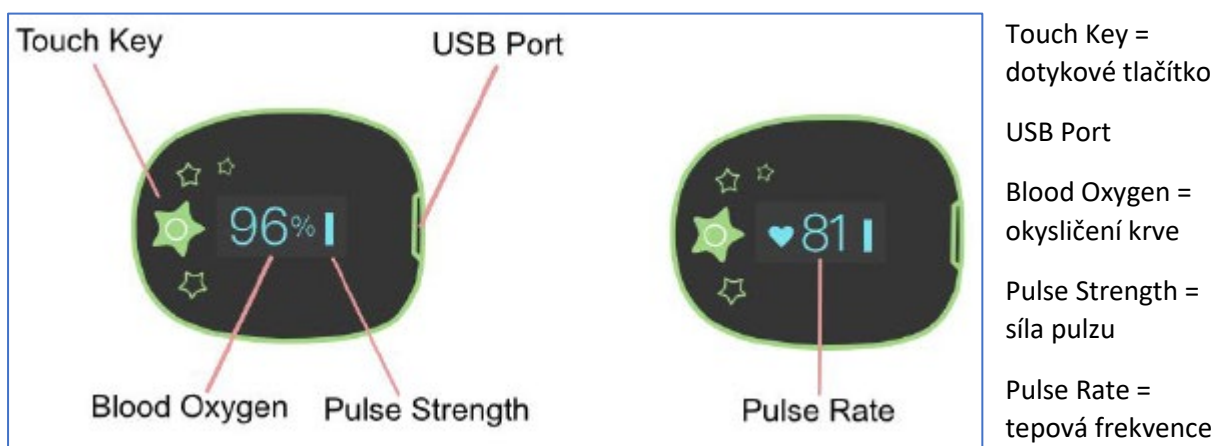

Používání zařízení a aplikace

Stáhněte si aplikaci ViHealt (iOS, Android)


Nabíjení – zařízení před použitím nabijte pomocí kabelu.

Zapnutí – po nasazení se zařízení automaticky zapne

Vypnutí – zařízení se automaticky vypne po sundání; ještě před vypnutím se zahájí odpočítání během kterého můžete zařízení nasadit zpět na prst a pokračovat v měření.

Spárování s aplikací – zapněte zařízení, spusťte aplikaci a vyberte KidsO2. Dotkněte se tlačítka v horní části zařízení.

Po vypnutí se do aplikace synchronizují zaznamenaná data. Předchozí měření ale muselo probíhat déle než 2 minuty. Uložené záznamy se ukládají do čtyř pozic, poté dojde vždy k přemazání nejstaršího záznamu.

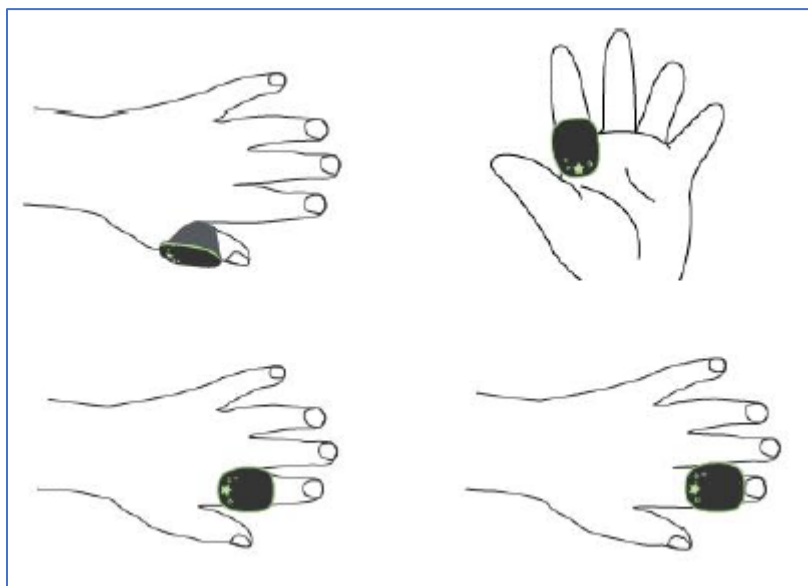

Způsoby nošení - zařízení může být nošeno na kterémkoliv prstu. Pro přesně naměřená data je nutné mít zařízení na prstu optimálně utažené – mezi zařízením a kůží nesmí být mezera.

Kontrola pulzního indexu (PI) - V rozhraní aplikace si můžete zkontrolovat signál PI, zelená barva znamená dobrý signál. Pokud je barva oranžová nebo červená, zkuste změnit prst pro měření.

Uspání obrazovky - displej se automaticky po chvíli zhasne. Pro probuzení do něj stačí ťuknout.



Nedostupná data – když se tento displej zobrazí na obrazovce, znamená to, že čtení dat je nedostupné. To může být způsobeno nadměrným pohybem, příliš studeným prstem nebo špatným signálem.

Audio připomínka v zařízení nebo aplikaci – připomínka se může aktivovat při nízké úrovni SpO2. Připomínka z aplikace funguje jen v situaci, kdy je telefon odemčený a aplikace je aktivní.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že zařízení splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2023 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.