

Návod na použití respirátoru MEIYI MY-002

Respirátor slouží jako ochrana dýchacích cest.

Respirátor je určen pro jednorázové použití.

Respirátor je nutné nasadit dle následujícího postupu:

1. Vyjměte masku z obalu a přiložte ji k obličeji
2. Za pomoci gumiček umístěte za uši
3. Masku upravte tak, aby těsně zakrývala nos a bradu.
4. Vytvarujte pásek okolo nosu

Upozornění:

Během používání respirátoru si nesahejte na oči ani obličej.

Skladujte v původním balení, v suchu mimo přímé sluneční světlo.



Návod na použitie respirátora MEIYI MY-002

Respirátor slúži ako ochrana dýchacích ciest.

Respirátor je určený na jednorazové použitie.

Respirátor je nutné nasadiť podľa návodu:

1. Vyberte masku z obalu a priložte ju k tvári
2. Za pomoci gumičiek umiestnite za uši
3. Masku upravte tak, aby tesne zakrývala nos a bradu.
4. Vytvarujte pásik okolo nosa

Upozornení:

Počas používania respirátora si nesiahajte na oči ani tvár.

Skladujte v pôvodnom balení, v suchu mimo priameho slnečného svetla.

